

# Testovacia súprava na stanovenie alfa defenzínu s laterálnym prietokom Synovasure®

Na diagnostické použitie *in vitro*

## MENO A URČENÉ POUŽITIE

Testovacia súprava na stanovenie alfa defenzínu Synovasure® poskytuje pozitívnu a negatívnu kontrolu na použitie s testovacou súpravou na stanovenie alfa defenzínu s laterálnym prietokom Synovasure® (REF 00-8888-125-01, -05, -10, -30) alebo inými súpravami, ktoré vyžadujú kontrolu alfa defenzínu.

Kontrolná súprava Synovasure alfa defenzínu je určená len na profesionálne použitie.

## VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- V prípade, že sa nebude postupovať podľa návodu, môže dôjsť k nepresným výsledkom.
- Pri použití s pomôckou Synovasure na testovanie alfa defenzínu s laterálnym prietokom dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v návode na použitie.
- Kontrolná rekonštitučná fľaštička, ktorá je súčasťou tejto súpravy, obsahuje dilučný tlmivý roztok. Dilučný tlmivý roztok obsahuje konzervačné látky, ktoré môžu spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu hmly alebo výparov. Môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest. Pozrite si KBÚ, ktorá je k dispozícii na stránke [www.cddiagnostics.com](http://www.cddiagnostics.com).
- Sklenené liekovky otvárajte opatrne. V liekovkách je podtlak.

## DODÁVANÉ ČINIDLÁ A MATERIÁLY

REF 00-8888-125-02	Testovacia súprava na stanovenie alfa defenzínu Synovasure	Množstvo
REF P50026	Pozitívny kontrolný roztok 0,25 ml alebo 16 µg/ml alfa defenzínu v syntetickej synoviálnej tekutine, lyofilizovaný, sklenená liekovka so zátkou	1
REF P50027	Negatívny kontrolný roztok 0,25 ml syntetickej synoviálnej tekutiny, lyofilizovaná, sklenená liekovka so zátkou	1
REF P50028	Kontrolná rekonštitučná fľaštička 2 ml kontrolného dilučného tlmivého roztoku – zafarbený na žltó	1

**Poznámka:** Súpravu činidiel skladujte pri teplote 2 až 30 °C. Rehydratované kontrolné roztoky sa môžu znovu uzavrieť a skladovať až tri (3) týždne pri teplote 2 až 8 °C.









## POSTUP POUŽITIA KONTROLNEJ SÚPRAVY ALFA DEFENZÍNU SYNOVASURE

1. Pred použitím výrobku si dôsledne prečítajte príbalový leták.
2. Pred testovaním vždy skontrolujte dátum expirácie. **NEPOUŽÍVAJTE** súpravy po dátume expirácie vytlačenom na škatuľke. Vždy skontrolujte komponenty súpravy, či nie sú poškodené. Ak sú akékoľvek komponenty poškodené, súpravu zlikvidujte a vyberte novú súpravu na testovanie.
3. Vyberte liekovku obsahujúcu pozitívny kontrolný roztok a zložte kryt. Zložte kryt z fľaštičky na rekonštitúciu a pridajte päť (5) celých kvapiek tekutiny na rekonštitúciu do liekovky s obsahom pozitívneho kontrolného roztoku. Zložte kryt na pozitívny kontrolný roztok a počkajte 10 minút. Jemne premiešajte opakovaným poklepávaním na trubicu prstom, až kým sa roztok úplne nerozpustí. Vyhýbajte sa prevracaniu.
4. Zopakujte kroky vyššie aj pre negatívny kontrolný roztok.
5. Po príprave kontrolných roztokov a dôkladnom premiešaní roztokov z nich spustíte vzorky podľa návodu na použitie priloženého v testovacej súprave Synovasure alfa defenzínu s laterálnym prietokom alebo tak, ako je overené v iných aplikáciách vyžadujúcich kontroly alfa defenzínu.

Synovasure je licencovaná ochranná známka spoločnosti Zimmer Biomet Holdings Inc., nástupníckej spoločnosti Zimmer Holdings Inc.

Ďalšie informácie o výrobku si pozrite na stránke [www.cddiagnostics.com](http://www.cddiagnostics.com)

**Popis symbolov**

	In vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka		Autorizovaný zástupca v Európskej únii		86 °F 30 °C Ohraničenie teploty
	Prečítajte si návod na použitie		Spotrebujte do		Výrobca
	Nesterilné zariadenie		Obsahuje dostatočné množstvo na <n> testov.		

